


ロタディスク 各部位の名称 (薬品名:セレベント、フルタイド)

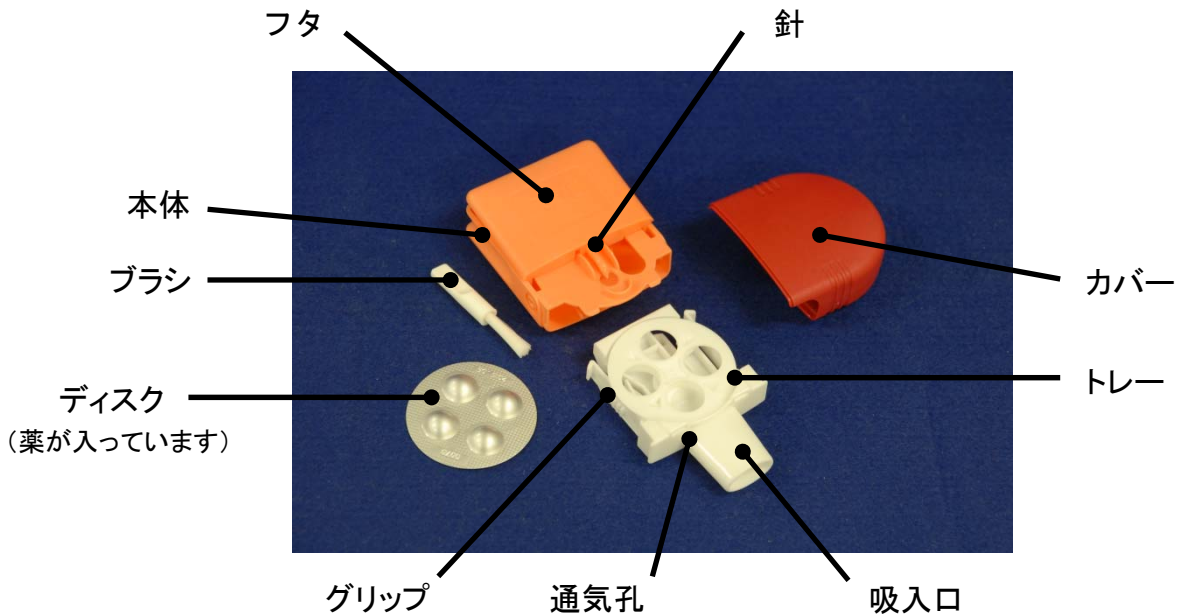


ロタディスクのディスク装着方法 (薬品名:セレベント、フルタイド)

※ 1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残り回数です)

ディスク装着方法

- カバーを外します (A)
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出します (B)
- トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します (C)
- トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます (D)
- ディスクをのせたトレーを本体にカチッと音がするまで押し戻します (E)
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します (F)
- ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に“4”を表示させます (G)

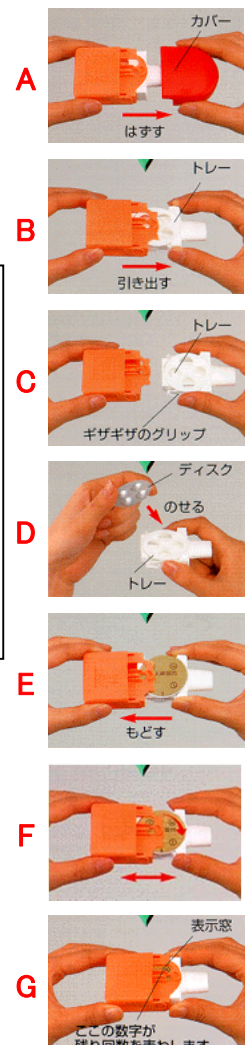

ロタディスクの吸入手順(薬剤師用)

(薬品名:セレベント、フルタイド)

- ※ 操作はフタを上にして、すべて水平に行ってください
- ※ ディスク装着方法は1枚目(1/2)を参照

